



EIZO®

# 用户手册 FP-2703W


EIZO 68 cm (27.0英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

## 注

- 安装时，请小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或机壳。此外不要经常取下屏幕保护膜，否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 屏幕保护膜具备防反光面和亮面。请选择合适的一面。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时，最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。
- 在搭载集成前传感器（滑动式）的显示器上安装屏幕保护膜后，会停用集成前传感器（滑动式）。需要更改显示器和RadiCS/RadiCS LE的设置。参照各自的用户手册了解详情。

## 安装

安装之前，擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

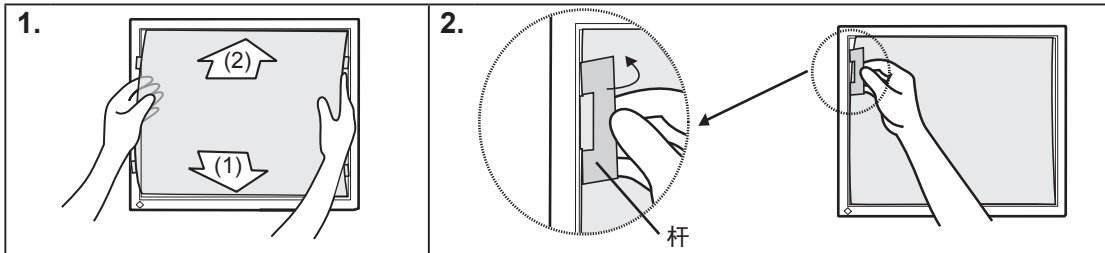


1. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中，先下（1）后上（2）。
2. 用随附的工具（杆）将屏幕保护膜的（6个）凸起插入侧面凹槽。

把杆放在屏幕保护膜的凸起上，朝液晶面板移动，进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板，不要留下开口。

建议您使用挡片，防止屏幕保护膜弯曲或从显示器滑脱。附属2种类型的挡片。确认挡片包装袋上标注的“适用机型”，根据显示器选用合适的类型。

安装挡片之前，擦除显示器机壳上的灰尘和污垢。按照以下步骤安装挡片。

1. 撕下挡片的保护膜。
2. 将挡片安装到显示器机壳上。

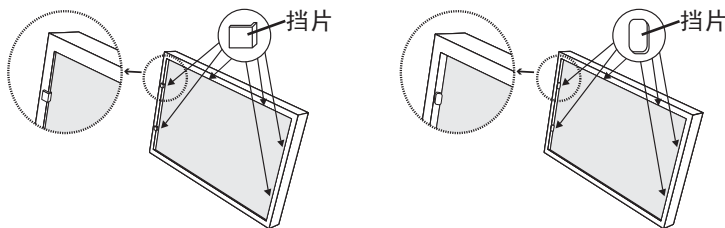

## 拆卸

从机壳上取下挡片。把杆放在屏幕保护膜的凸起上，朝向机壳移动，将其取下。

## 清洁

### 注

- 清洁时请务必使屏幕保护膜保持不动。否则可能划伤液晶面板表面。用手握住屏幕保护膜时，请使用软布，避免留下灰尘或指印。
- 酒精、防腐溶液等化学品可能造成机壳或面板的光泽变化、变色、退色，还会降低图像质量。
- 切勿使用可能损坏机壳或面板的溶剂或化学品，如稀释剂、苯、蜡、去污剂。

如有必要，请将小块软布用水蘸湿，擦除机壳和面板表面的污垢。

### 参考

- 清洁机壳和面板表面时，推荐使用任选的ScreenCleaner。

## 规格

表面处理	防反光面：防反光Hard Coating / 亮面：Hard Coating		
表面硬度	2H		
反射率	6.8%以下	可见光透过率	90%以上
尺寸 / 重量	601.0 mm (宽) × 340.1 mm (高) × 1.0 mm (深) / 约 245 g		
配件	杆（屏幕保护膜用）1个，挡片2种类型6个，用户手册		



## **EIZO Corporation**

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan  
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

## **EIZO Europe GmbH**

Helmut-Grashoff-Strasse 18, 41179 Mönchengladbach, Germany  
Phone: +49 2161 8210210 Fax: +49 2161 8210150

## **EIZO 株式会社**

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizoglobal.com>  
<http://www.eizo.co.jp>

Copyright © 2012-2015 EIZO Corporation All rights reserved.

3rd Edition-November, 2015 Printed in Japan.

00N0L768C1  
(U.M-FP-2703W-AL)